


ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

SZYBKA INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCA


**ABRA
PRO**

Niniejsza instrukcja pomoże Ci ustawić i przygotować glukometr do przeprowadzenia badań. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Użycia dołączona do zestawu ABRA PRO.

1. OPIS GLUKOMETRU

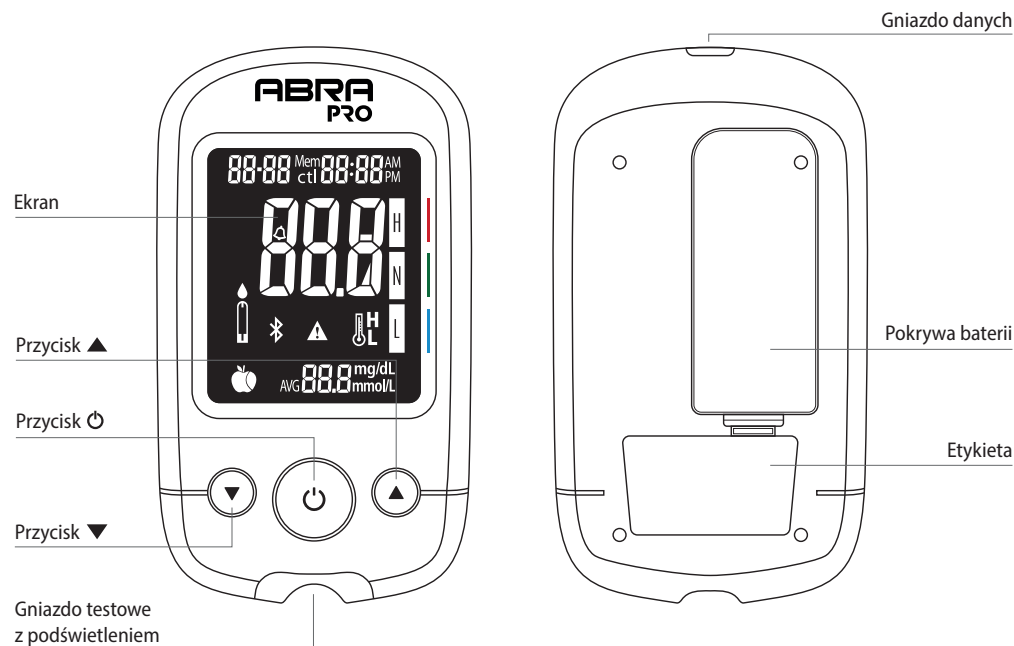







2. URUCHOMIENIE GLUKOMETRU

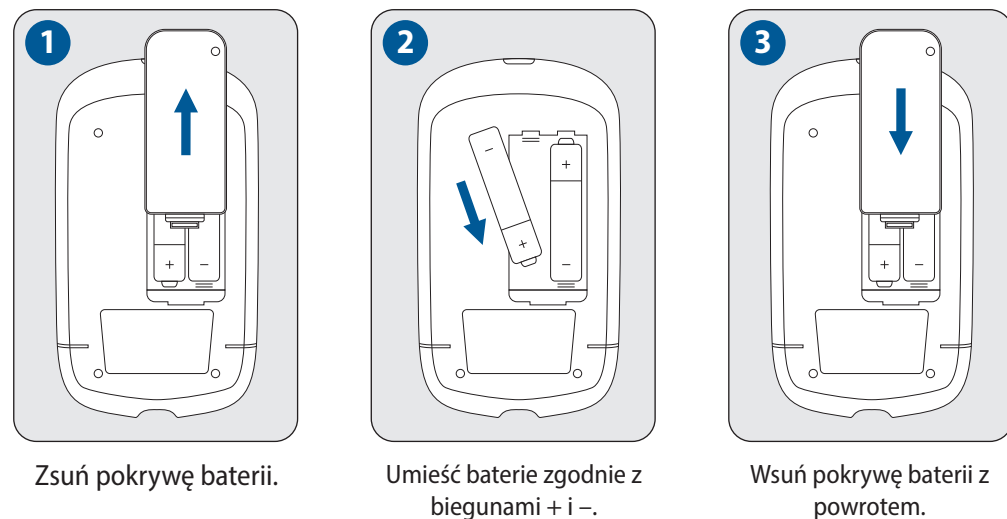

3. USTAWIENIE DATY I GODZINY




4. PRZYGOTOWANIE NAKŁUWACZA

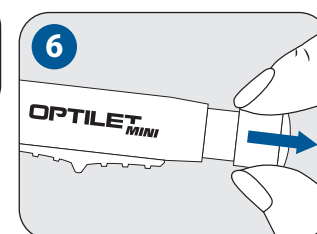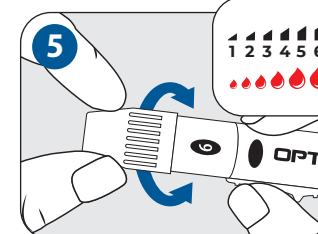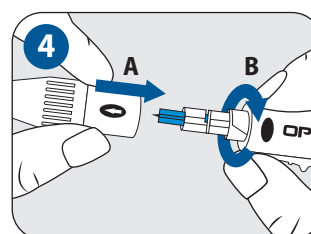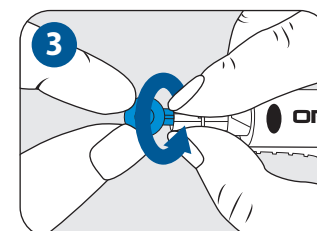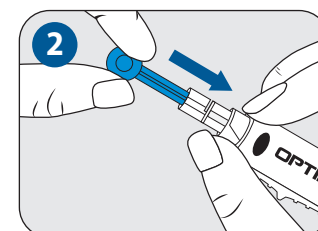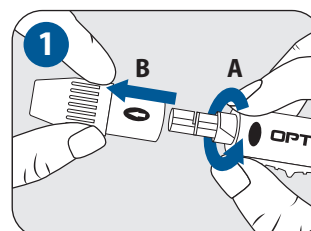


*Nie zdejmujemy końcówki przezroczystej, która służy do regulacji nakłucia tylko nasadkę nakłuwacza


5. PRZEPROWADZENIE BADANIA

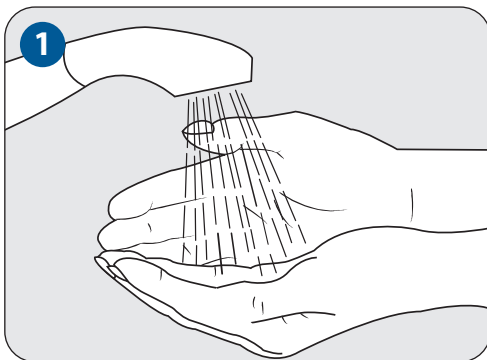


Przed przystąpieniem do pomiaru umyj ręce wyłącznie wodą z mydłem, a następnie osusz.

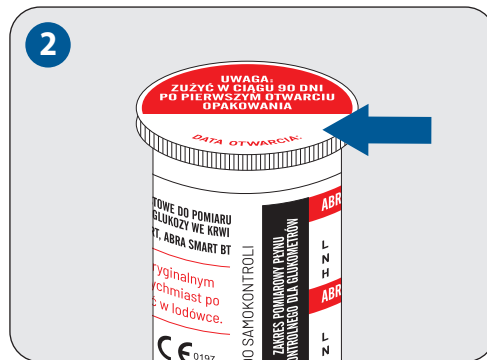


Zapisz datę pierwszego otwarcia pojemnika. Wyjmij pasek testowy i zamknij szczelnie opakowanie.

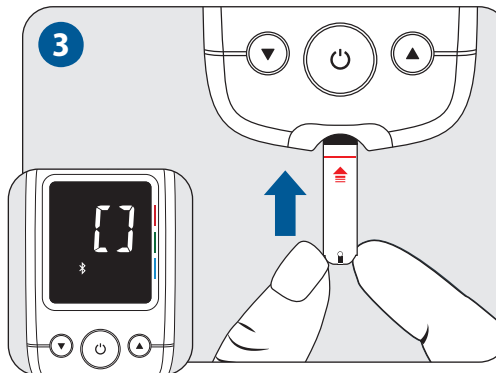


Włóż pasek testowy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawią się poruszające się linie.

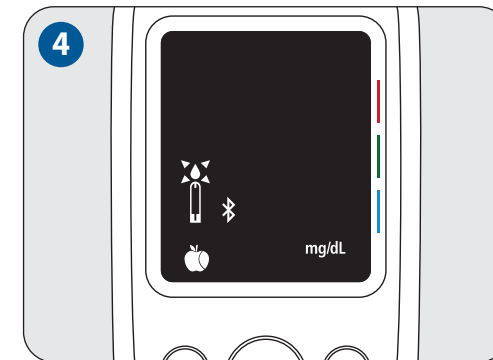


Migający symbol oznacza, że urządzenie nie jest gotowe na próbkę krwi. Użyj przycisków i , aby wybrać pomiar przed posiłkiem lub po posiłku .

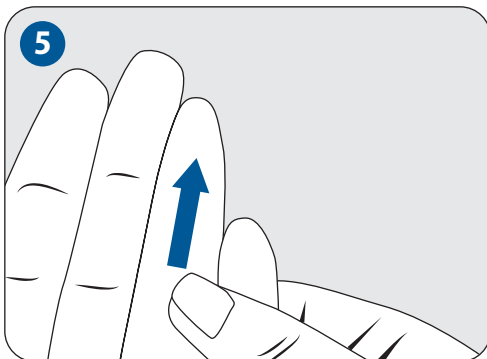


Rozmasuj energicznie miejsce pobrania krwi.

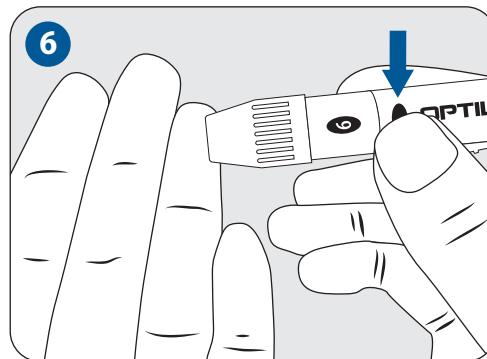


Przyłóż mocno nakłuwacz i wciśnij przycisk zwalniający. Kliknięcie oznacza, że nakłucie zostało wykonane.

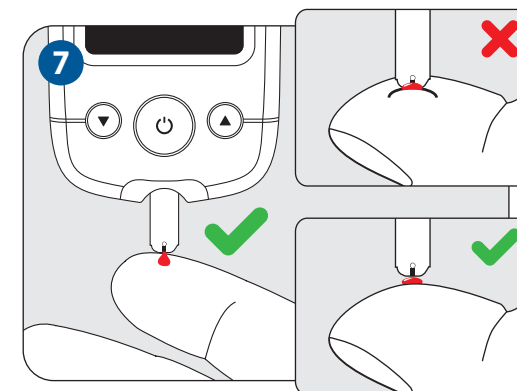


Przyłóż końcówkę paska testowego włożonego do glukometru do kropli krwi. Kropla zostanie automatycznie zassana.

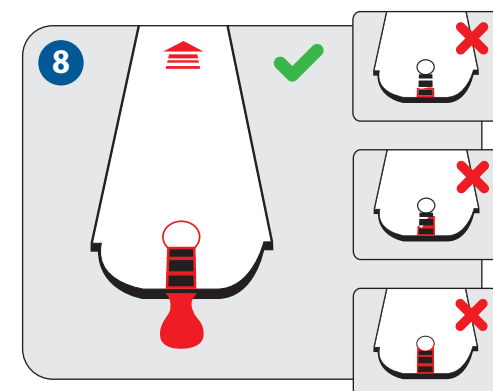


Upewnij się, że obwód okienka potwierdzenia jest całkowicie wypełniony krwią.

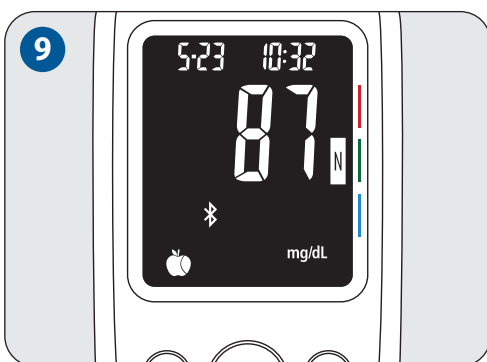

Gdy okienko paska testowego zostanie wypełnione krwią, urządzenie rozpocznie odliczanie od 5 do 1 i wyświetli wynik pomiaru.

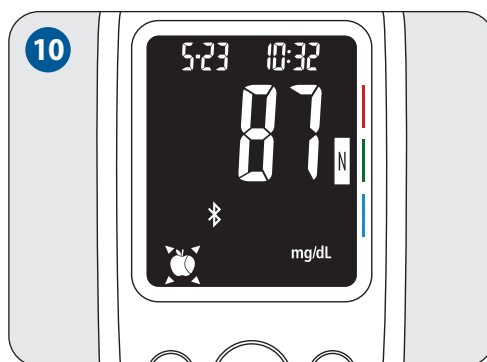

Jeśli nie oznaczyłeś wcześniej pomiaru (krok 4), możesz to zrobić teraz. Znak jabłuszka będzie migał, aby Ci o tym przypomnieć.

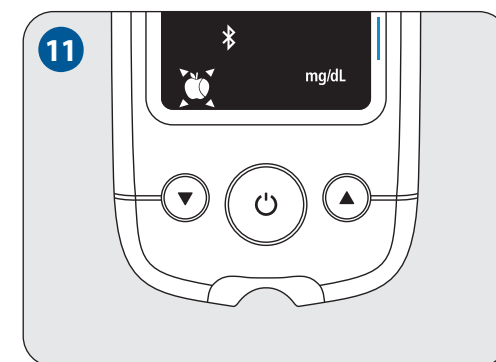

Wybierz lub , aby oznaczyć pomiar jako przed posiłkiem lub po posiłku . Zatwierdź wybór przyciskiem .

INFOLINIA

CZYNNA:
Poniedziałek - piątek

W GODZINACH:
8.00 - 16.00

800 70 30 11
dla telefonów stacjonarnych
połączenie bezpłatne

+48 85 874 69 28
dla telefonów komórkowych
(koszt połączenia ponosi
dzwoniący zgodnie z taryfą
operatora)

Diagnosis S.A.,
ul. Gen. W. Andersa 38A,
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl



Rev. 2022.06.14 v.1