

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

SZYBKA INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCA


ABRA
SMART BT

Niniejsza instrukcja pomoże Ci ustawić i przygotować glukometr do przeprowadzenia badań. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Używania dołączona do zestawu ABRA SMART BT.

1. OPIS GLUKOMETRU



2. WKŁADANIE BATERII

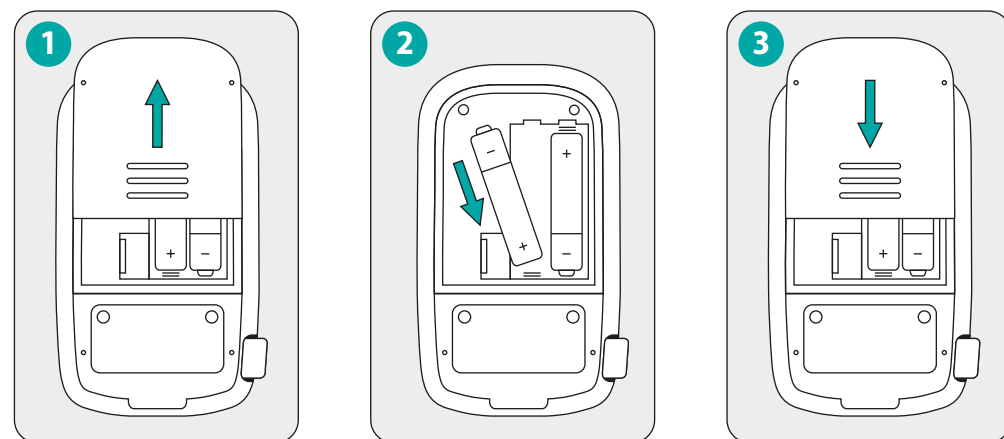

Zsuń pokrywę baterii.

Umieść baterie zgodnie z biegunami + i -.

Wsuń pokrywę baterii z powrotem.

3. USTAWIENIE DATY I GODZINY



Przy wyłączonym glukometrze wciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ przez 4 sek. Wybierz format czasu używając ▲ i ▼. Zatwierdź wybór przyciskiem ⏻.



Ustaw rok używając ▲ i ▼. Zatwierdź wybór przyciskiem ⏻.




Ustaw miesiąc i dzień używając ▲ i ▼. Zatwierdź wybór przyciskiem ⏻.




Ustaw godzinę i minuty używając ▲ i ▼. Zatwierdź wybór przyciskiem ⏻.


4. PRZYGOTOWANIE NAKŁUWACZA

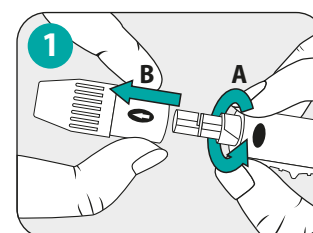


Przekręć i ściągnij nasadkę nakłuwacza.

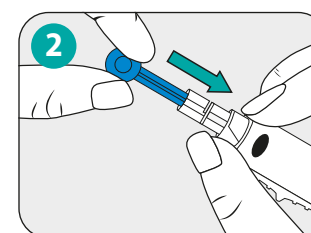


Umieść stabilnie lancet w uchwycie lancetu.

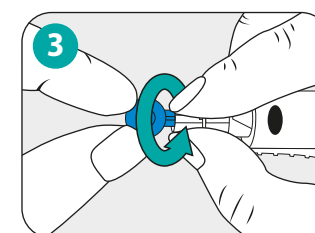


Ostrożnie pokręć i zdejmij końcówkę ochronną lancetu.

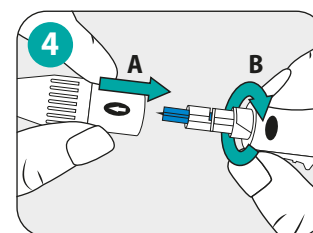

Nałóż nasadkę nakłuwacza i dokręć ją.

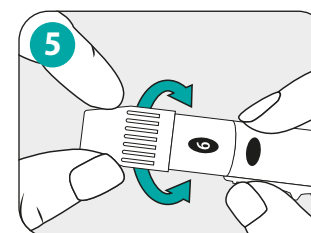


Ustaw głębokość nakłucia skóry, obracając końcówką nakłuwacza.

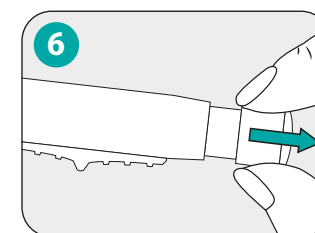


Odciągnij przycisk naciągający do oporu, a następnie go puść.


5. PRZEPROWADZENIE BADANIA

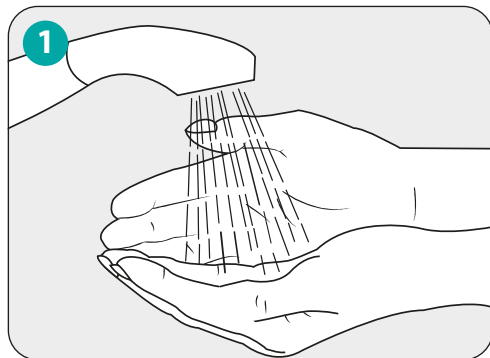


1 Przed przystąpieniem do pomiaru umyj ręce wyłącznie wodą z mydłem, a następnie osusz.

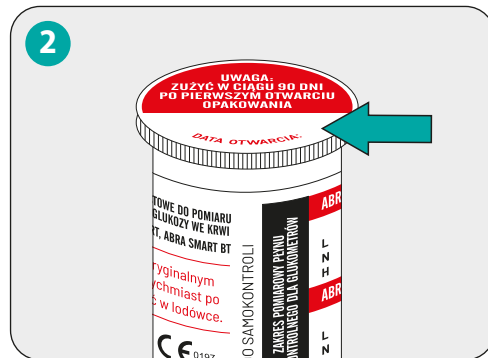


2 Zapisz datę pierwszego otwarcia pojemnika. Wyjmij pasek testowy i zamknij szczelnie opakowanie.

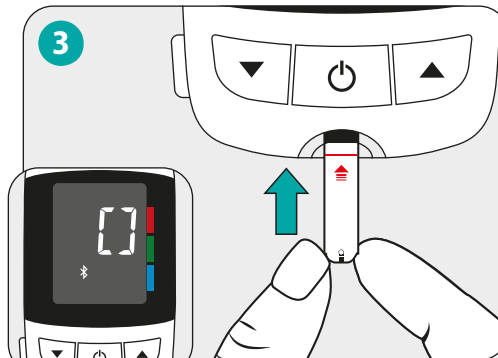


3 Włóż pasek testowy do glukometru. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zobaczysz poruszające się linie.

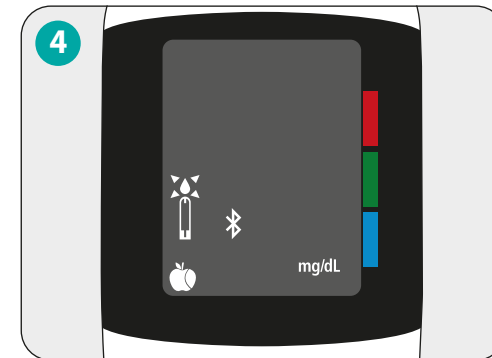


4 Migający symbol oznacza, że urządzenie jest gotowe na próbkę krwi. Użyj przycisków i , aby wybrać pomiar przed posiłkiem lub po posiłku .

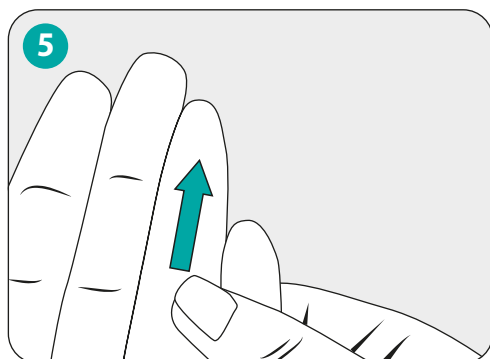


5 Rozmasuj energicznie miejsce pobrania krwi.

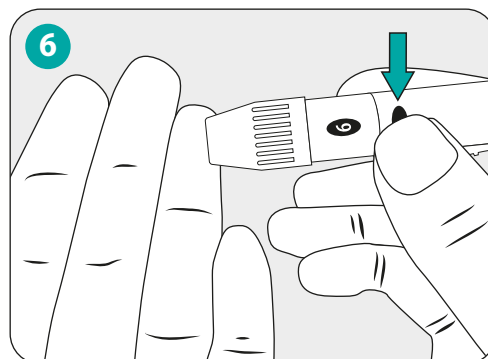


6 Przyłóż nakłuwacz do miejsca planowanego nakłucia i wciśnij przycisk zwalniający. Kliknięcie oznacza, że nakłucie zostało wykonane.

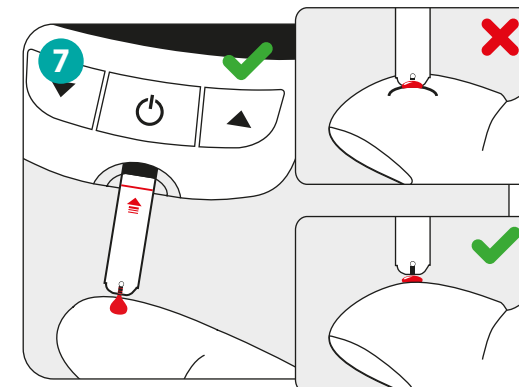


7 Przyłóż końcówkę paska testowego do kropli krwi, która zostanie automatycznie zassana.

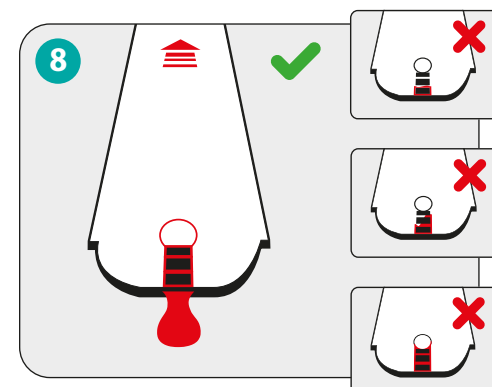


8 Upewnij się, że obwód okienka potwierdzenia jest całkowicie wypełniony krwią.

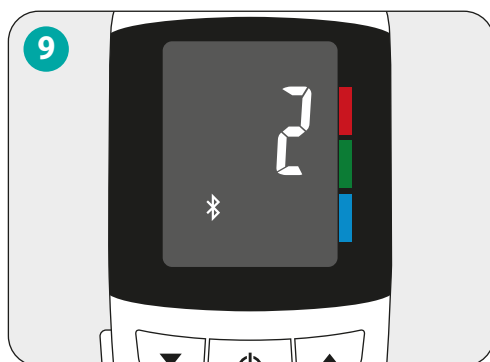

9 Gdy okienko paska testowego zostanie wypełnione krwią, urządzenie rozpocznie odliczanie od 5 do 1

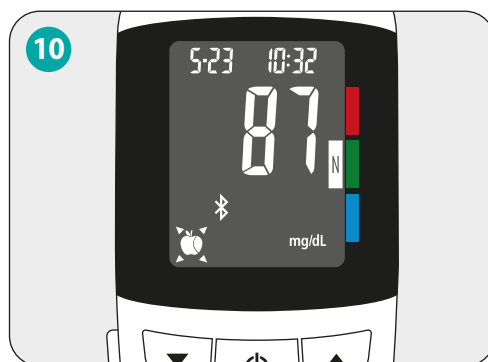

10 Jeśli nie oznaczyłeś wcześniej pomiaru (krok 4), możesz to zrobić teraz. Znak jabłuszka będzie migał, aby Ci o tym przypomnieć.

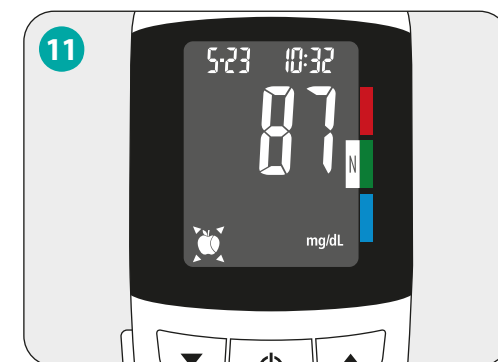

11 Wybierz lub , aby oznaczyć pomiar jako przed posiłkiem lub po posiłku . Zatwierdź wybór przyciskiem .

INFOLINIA

CZYNNA:
poniedziałek–piątek

W GODZINACH:
8⁰⁰–16⁰⁰

800 70 30 11
dla telefonów stacjonarnych
połączenie bezpłatne

+48 85 874 69 28
dla telefonów komórkowych
(koszt połączenia ponosi
dzwoniący zgodnie z taryfą
operatora)

Diagnosis S.A.,
ul. Gen. W. Andersa 38A,
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

0197

Rev. 2023.03.27 v.1